

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORI

MEDASEPT NITRIL PRIME PF, NITRIL PREMIUM PF, NITRIL ALOEVIT PF, LATEX PREMIUM PF, TPEX, TPEX BLUE, VINYL PF

Descriere Produs:

- o Mănuși de examinare și protecție realizate din nitril/latex, vinyl, TPE, fără interior pulverizat cu vreun tip de pudră, nesterile, de unică folosință, montabile atât pe partea stângă, cât și pe cea dreaptă, echipamentul individual de protecție din categoria 1 pentru risc minim
- o Dimensiuni disponibile: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- o Designul împreună cu etichetarea este conform cu MDD 93/42 / EEC și PPE 89/686 / EEC

Condiții de transport și depozitare:

- o Protejați-l de lumina soarelui, de lumina fluorescentă și de ozon
- o Depozitați într-un loc uscat la 5-30 ° C
- o Umiditatea relativă recomandată la locul de depozitare este de 60 ± 20%
- o Depozitați la cel puțin 1 m distanță de dispozitivele de încălzire și sursele de incendiu
- o Nu depozitați aproape de solvenți, uleiuri, combustibili sau lubrifianți
- o Dulapurile cu cutii din carton sunt adecvate pentru transport și depozitare

Curățarea: mănuși de unică folosință, care nu trebuie curățate

Eliminarea:

- o Mănușile folosite pot fi contaminate biologic sau cu substanțe chimice periculoase
- o După folosire, mănușile trebuie eliminate în conformitate cu prevederile aplicabile din legislația locală
- o arderea mănușilor trebuie efectuate în condiții controlate

Precauții:

- o Înainte de utilizare, mănușile trebuie verificate pentru defecte sau imperfecțiuni de producție
- o În cazul în care, în timpul utilizării, mănușile sunt rupte, rupte sau perforate, trebuie înlocuite imediat și, în caz de dubiu, ar trebui folosită o nouă pereche de mănuși
- o Toate substanțele chimice trebuie păstrate departe de piele, chiar dacă nu sunt periculoase
- o În cazul în care substanța chimică penetrează pe piele, aceasta trebuie spălată imediat cu o cantitate mare de apă și puțină săpun
- o Evitați folosirea mănușilor contaminate pe interior deoarece acest lucru poate duce la iritații care pot duce la inflamarea pielii sau la alte vătămări grave
- o Nu utilizați mănuși dacă există riscul ca mănușile să fie încurcate de piesele de mașină în mișcare
- o Mănușile nu trebuie folosite în contact cu foc deschis sau pentru a proteja împotriva oricărui tip de unelte ascuțite
- o Mănușile nu sunt destinate sudării, protecției împotriva șocurilor electrice, radiațiilor ionizante sau contactului cu obiecte fierbinți sau reci. Pentru fiecare pacient și pentru fiecare procedură medicală trebuie folosite câte o pereche de mănuși - mănuși de unică folosință
- o În timpul utilizării mănușilor, se pot folosi numai detergenți ușori de spălare și agenți de dezinfectare care nu provoacă iritarea pielii mâinilor
- o Înainte de a pune pe mănuși, mâinile trebuie uscate bine
- o După fiecare îndepărtare a mănușilor, se recomandă spălarea temeinică și uscarea mâinilor precum și aplicarea cremei de condiționare
- o Nu utilizați mănuși în cazul în care utilizatorul sau pacientul care intră în contact cu mănușile trebuie să fie alergic la latex
- o Mănușile din cauciuc natural din latex pot stimula efectele alergice, inclusiv reacțiile anafilactice
- o Lungimea mănușilor de protecție mai mici de 270 mm - mănuși de uz special deoarece sunt și mănuși de examinare